



MS_Prozess __1405_PPT_Bereitstellung (Offizin)

MS_Dok-Bez. BE-Betriebs-dok

Detail zur Dok-Art CHECKLISTE

Titel Verwendung von Behältern für Abfälle mit Verletzungsgefahr

Ergänzung zum Titel Mat: 2520.1865

Freigabe der Vorlage (Master) im DVS:

Ersteller C. Bovard Reusser

Prüfer M. Flück

Freigeber DVS J. P. Buchs

Sie erhalten gemäss Zuteilung San Trp aufgrund Ihrer Tätigkeit eine 2-teilige Entsorgungsbox 30 Liter SAP 2529.6150 für medizinische Abfälle mit Verletzungsgefahr. Bei anderen Trp ist der Kanülensammler Sani Safe 0.2 L SAP 2520.1865 (im Einh San- oder Notarzt-Rucksack vorhanden) zu verwenden.

Aufgrund der geltenden nationalen gesetzlichen Vorschriften wie

Verordnung über den Verkehr mit Abfällen (VeVA), Liste über den Verkehr mit Abfällen (LVA, Vollzugshilfe BUWAL über Entsorgung von medizinischen Abfällen sowie **ADR/SDR**

sind zwingend folgende Punkte zu beachten:


- Der stichfeste, flüssigkeitsdichte und verschliessbare Abfallbehälter ist ausschliesslich für die Entsorgung von Abfällen mit Verletzungsgefahr „Sharps“ zu verwenden. Dabei handelt es sich um Abfälle medizinischer Hilfsmittel, die durch Form und Material Verletzungen verursachen können. Beim Entsorgen steht deshalb die Sicherheit im Vordergrund.

Beispiele von Sharps sind:

Kanülen aller Art, Brechampullen, Lanzetten, Einsteckdorne, Kapillaren, Skalpell Klingen, Pipetten und Pipetten Spitzen, Objektträger und Deckgläser



- Der separat gelieferte gelbe Deckel darf / soll nur anlässlich der korrekten Verwendung als Abfallbehälter für Sharps aufgesetzt werden; die Kennzeichnung als Gefahrgut UN 3291 bedeutet beim korrekt verschlossenen Abfallbehälter, dass dieser nach ADR auch in kleinsten Mengen als Gefahrgut zu behandeln/transportieren ist!

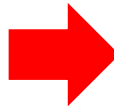

- Der Behälter darf nicht für andere Abfälle benützt werden!
Unbenützte Behälter sind 2-teilig, d.h. ohne aufgesetzten Deckel zurückzugeben!

Ablage: SAP / DVS
 unterliegt nicht dem Änderungsdienst (nur Informationskopie, falls angekreuzt)

Verteiler: als Beilage zur Entsorgungsbox Wastel 30Lt 2-teilig
 <https://www.vtg.admin.ch/de/organisation/lba/armeeapotheke.html#ui-collapse-975>

Verwendung von Behältern für Abfälle mit Verletzungsgefahr			
SAP/DVS Nr:	AFR / 105112	Teildok:	000
Version:			00
© Armeeapotheke	Gültig ab:	13.05.2021	Seite 1 von 1