



## CHECKLISTE

### Verwendung der Behälter für Abfälle mit Verletzungsgefahr

Sie erhalten gemäss Zuteilung San Trp aufgrund ihrer Tätigkeit eine 2-teilige Entsorgungsbox 30 Liter SAP 2529.6150 für medizinische Abfälle mit Verletzungsgefahr. Bei anderen Trp ist die kleine Sani Safe Entsorgungsbox SAP 2520.1865 (im Einh San- oder Notarzt-Rucksack vorhanden!) zu verwenden.

Aufgrund der geltenden nationalen gesetzlichen Vorschriften wie


**Verordnung über den Verkehr mit Abfällen (VeVA)**, Liste über den **Verkehr mit Abfällen (LVA, Vollzugshilfe BUWAL** über Entsorgung von medizinischen Abfällen sowie **ADR/SDR**

sind zwingend folgende Punkte zu beachten:

- Der stichfeste, flüssigkeitsdichte und verschliessbare Abfallbehälter ist ausschliesslich für die Entsorgung von Abfällen mit Verletzungsgefahr „Sharps“ zu verwenden. Dabei handelt es sich um Abfälle medizinischer Hilfsmittel, die durch Form und Material Verletzungen verursachen können. Beim Entsorgen steht deshalb die Sicherheit im Vordergrund. Beispiele von Sharps sind:

**Kanülen aller Art, Brechampullen, Lanzetten, Einsteckdorne, Kapillaren, Skalpellklingen, Pipetten und Pipettenspitzen, Objektträger und Deckgläser**

- Der separat gelieferte gelbe Deckel darf / soll nur anlässlich der korrekten Verwendung als Abfallbehälter für Sharps aufgesetzt werden; die Kennzeichnung als Gefahrgut UN 3291 bedeutet beim korrekt verschlossenen Abfallbehälter, dass dieser nach ADR auch in kleinsten Mengen als Gefahrgut zu behandeln/transportieren ist!

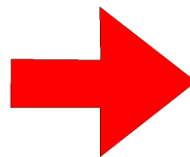

- Der Behälter darf nicht für andere Abfälle benützt werden!  
Unbenützte Behälter sind 2-teilig (!) ohne aufgesetzten Deckel zurückzugeben!

Ablage:  SAP / DVS  
 unterliegt nicht dem Änderungsdienst (nur Informationskopie, falls angekreuzt)

Verteiler:  .als Beilage zur Entsorgungsbox Wastel 30Lt 2-teilig

Armeeapotheke / PPT	Freigabedatum: 01.07.2010	Ersetzt:	Erstausgabe
Erstellt: BOC 25.06.2010	Freigabe: MTT	Gültig ab:	01.07.2010
Titel: Verwendung der Behälter für Abfälle mit Verletzungsgefahr		Version:	00
SAP/DVS Nr: AFR 105112 00	MS Nr Schlüssel: CL-14-05-00-008	© Armeeapotheke	Seite 1 von 1