



## Anwenderkontrolle: Defibrillator Heartstart FR2

Die Kontrolle erfolgt gemäss der Bedienungsanleitung des Defibrillators «Kapitel 4. Wartung, Test und Fehlerbehebung» und sollte mindestens monatlich durchgeführt werden.

Standort Defibrillator:		Verantwortlicher:		Telefonnummer:	
Herstellernummer:		Modellnummer:			

Datum der Kontrolle:													
Kontrolle ausgeführt von:													
Visum:													
Kontrollpunkte													
Defibrillator ist sauber, keine Schäden ersichtlich													
2 Elektrodenpakete vorhanden, versiegelt, unbeschädigt, Verfalldatum in Ordnung													
Statusanzeige: Zeigt abwechselnd Sanduhr / Feld													
Definiertes Zubehör vorhanden Verfalldatum in Ordnung (Handschuhe, Ersatzbatterie, etc.)													
Bemerkungen:													

Tritt am Defibrillator eine Störung auf (bspw. blinkendes rotes Kreuz in der Statusanzeige), wenden Sie sich direkt an den Verantwortlichen Ihres Standortes oder an die Armeepotheke (Kundenmanagement), Tel. 058 464 34 21/22 oder 058 464 20 95

Erstellt:	MPR	Prüfung:	HOLW	Freigabe:	BUJ
© Armeepotheke / MPT		Version:	01	Ersetzt:	Version 00

Titel: Anwenderkontrolle: Defibrillator Heartstart FR2		Gültig ab: 22.06.2018	
MS Nr Schl.: CL-15-04-00-048	SAP/DVS Nr: AFR / 106097	Teildok: 000	Seite 1 von 1