



MS_Prozesszuordnung

BP - Entwicklung Medizinprodukte

MS_Dok-Bezeichnung

BE-Betriebsdokument (ohne regelmässige Überprüfung)

Detail zur Dok-Art

CHECKLISTE

Titel

Anwenderkontrolle: Defibrillator Mindray BeneHeart C1A

Freigabe der Vorlage (Master) im DVS:

Erstellt

V. Palmiteri

Geprüft


J. Furer

Freigabe im DVS

J. Furer

Die Anwenderkontrolle des Defibrillators soll in regelmässigen Abständen (mindestens einmal pro Monat) durchgeführt werden.

Standort Defibrillator:		Verantwortliche/r:		Telefonnummer:	
Hersteller Seriennummer:	Geräterückseite	ID-Nummer AApot:			

Datum der Kontrolle:									
Kontrolle ausgeführt von:									
Visum:									
Kontrollpunkte									
Der Defibrillator ist sauber, keine Schäden ersichtlich.									
1 Elektrodenpaket im Gerät vorhanden, versiegelt, Verfalldatum von aussen sichtbar und nicht abgelaufen sowie Elektroden am Gerät eingesteckt.									
Bei geschlossenem Deckel: Die Statusanzeige blinkt grün und signalisiert die Einsatzbereitschaft des Gerätes.									
Zusätzliches Zubehör vorhanden, einsatzbereit und das Verfalldatum nicht abgelaufen: (Notfall-Set, Anleitungen, Elektroden, usw.).									
Bemerkungen:									

Wenn die Statusanzeige am Defibrillator rot blinkt / keine Anzeige hat, dann führen Sie einen manuellen Selbsttest durch oder ersetzen Sie die Batterie. Wenn nach dem Selbsttest bei geschlossenem Deckel die Statusanzeige nicht grün blinkt, wenden Sie sich an den Verantwortlichen Ihres Standortes oder direkt an die Armeeapotheke: aapotas.lba@vtg.admin.ch oder Tel.: +41 58 467 45 68.

Anwenderkontrolle: Defibrillator Mindray BeneHeart C1A

SAP/DVS Nr.: VFR / 115386	Teildok: 000	Version: 00
© Armeeapotheke	Gültig ab: 31.10.2025	Seite 1 von 1