



MS_Prozesszuordnung LOG - Instandhaltung

MS_Dok-Bezeichnung BE-Betriebsdokument (ohne regelmässige Überprüfung)

Detail zur Dok-Art

CHECKLISTE

Titel

Anwenderkontrolle: Defibrillator ZOLL AED Pro

Freigabe der Vorlage (Master) im DVS:


Erstellt M. Köhli

Geprüft J. Furer

Freigabe im DVS J. Furer

Die Anwenderkontrolle des Defibrillators sollte in regelmässigen Abständen (bspw. monatlich; im Bedienerhandbuch nicht spezifiziert) durchgeführt werden.

Standort Defibrillator:		Verantwortliche/r:		Telefonnummer:	
Hersteller Seriennummer:					

Datum der Kontrolle:													
Kontrolle ausgeführt von:													
Visum:													
Kontrollpunkte													
Defibrillator ist sauber, keine Schäden ersichtlich													
2 Elektrodenpakete vorhanden, versiegelt, unbeschädigt, Verfalldatum in Ordnung													
Bereitschaftsanzeige: Das grüne Häkchen signalisiert, dass das Gerät einsatzbereit ist.													
Definiertes Zubehör vorhanden Verfalldatum in Ordnung (Handschuhe, Kurzanleitung, etc...)													
Bemerkungen:													

Tritt am Defibrillator eine Störung auf (bspw. ein rotes „X“ in Bereitschaftsanzeige), wenden Sie sich direkt an den Verantwortlichen Ihres Standortes oder an die Armeeapotheke: aapotas.lba@vtg.admin.ch oder Tel.: **+41 58 467 45 68**.

Anwenderkontrolle: Defibrillator ZOLL AED Pro

SAP/DVS Nr.: VFR / 107292 Teildok: 000 Version: 03

© Armeeapotheke Gültig ab: 01.04.2025 Seite 1 von 1