



MS_Prozesszuordnung LOG - Instandhaltung

MS_Dok-Bezeichnung BE-Betriebsdokument (ohne regelmässige Überprüfung)

Detail zur Dok-Art

CHECKLISTE

Titel

Anwenderkontrolle: Defibrillator Heartstart FR2

Freigabe der Vorlage (Master) im DVS:

Erstellt M. Köhli

Geprüft J. Furer

Freigabe im DVS J. Furer

Die Kontrolle erfolgt gemäss der Bedienungsanleitung des Defibrillators «Kapitel 4. Wartung, Test und Fehlerbehebung» und sollte mindestens monatlich durchgeführt werden.

Standort Defibrillator:		Verantwortliche/r:		Telefonnummer:	
Hersteller Seriennummer:		Modellnummer:			
Datum der Kontrolle:					
Kontrolle ausgeführt von:					
Visum:					
Kontrollpunkte					
Defibrillator ist sauber, keine Schäden ersichtlich					
2 Elektrodenpakete vorhanden, versiegelt, unbeschädigt, Verfalldatum in Ordnung					
Statusanzeige: Zeigt abwechselnd Sanduhr / Feld					
Definiertes Zubehör vorhanden Verfalldatum in Ordnung (Handschuhe, Ersatzbatterie, etc.)					
Bemerkungen:					

Tritt am Defibrillator eine Störung auf (bspw. blinkendes rotes Kreuz in der Statusanzeige), wenden Sie sich direkt an den Verantwortlichen Ihres Standortes oder an die Armeeapotheke: aapotas.lba@vtg.admin.ch oder Tel.: **+41 58 467 45 68**.

Anwenderkontrolle: Defibrillator Heartstart FR2

SAP/DVS Nr. : VFR / 106097 Teildok: 000 Version: 03

© Armeeapotheke Gültig ab: 01.04.2025 Seite 1 von 1