



MS_Prozesszuordnung LOG - Instandhaltung

MS_Dok-Bezeichnung BE-Betriebsdokument (ohne regelmässige Überprüfung)

Detail zur Dok-Art

CHECKLISTE

Titel

Anwenderkontrolle: Defibrillator Heartstart FR2

Freigabe der Vorlage (Master) im DVS:

Erstellt M. Köhli

Prüfung und Freigabe J. Furer

Die Kontrolle erfolgt gemäss der Bedienungsanleitung des Defibrillators «Kapitel 4. Wartung, Test und Fehlerbehebung» und sollte mindestens monatlich durchgeführt werden.

Standort Defibrillator:		Verantwortliche/r:		Telefonnummer:	
Hersteller Seriennummer:		Modellnummer:			

Datum der Kontrolle:													
Kontrolle ausgeführt von:													
Visum:													
Kontrollpunkte													
Defibrillator ist sauber, keine Schäden ersichtlich													
2 Elektrodenpakete vorhanden, versiegelt, unbeschädigt, Verfalldatum in Ordnung													
Statusanzeige: zeigt abwechselnd Sanduhr / Feld													
Definiertes Zubehör vorhanden Verfalldatum in Ordnung (Handschuhe, Ersatzbatterie, etc.)													
Bemerkungen:													

Tritt am Defibrillator eine Störung auf (bspw. blinkendes rotes Kreuz in der Statusanzeige), wenden Sie sich direkt an den Verantwortlichen Ihres Standortes oder an die Armeepotheke: aapotas.lba@vtg.admin.ch oder Tel.: **+41 58 467 45 68**.

Anwenderkontrolle: Defibrillator Heartstart FR2					
SAP/DVS Nr.:	VFR / 106097	Teildok:	000	Version:	04
© Armeepotheke	Gültig ab:	20.02.2026	Seite 1 von 1		