



MS_Prozesszuordnung LOG - Instandhaltung

MS_Dok-Bezeichnung BE-Betriebsdokument (ohne regelmässige Überprüfung)

Detail zur Dok-Art

CHECKLISTE

Titel

Anwenderkontrolle: Defibrillator Lifepak 1000

Freigabe der Vorlage (Master) im DVS:

Erstellt M. Köhli

Geprüft J. Furer

Freigabe im DVS J. Furer

Die Kontrollen erfolgen gemäss der Gebrauchsanweisung des Defibrillators «Kapitel 5. Pflege des Lifepak 1000 Defibrillators» und müssen regelmässig (gemäss Gebrauchsanweisung wöchentlich) durchgeführt werden.

Standort Defibrillator:		Verantwortliche/r:		Telefonnummer:	
Hersteller Seriennummer:					
Datum der Kontrolle:					
Kontrolle ausgeführt von:					
Visum:					
Kontrollpunkte					
Defibrillator ist sauber, keine Schäden ersichtlich					
2 Elektrodenpakete vorhanden, versiegelt, unbeschädigt, Verfalldatum in Ordnung					
Statusanzeige: Symbole OK angezeigt Batteriekapazität in Ordnung					
Definiertes Zubehör vorhanden Verfalldatum in Ordnung (Handschuhe, Ersatzbatterie, etc...)					
Bemerkungen:					

Tritt am Defibrillator eine Störung auf (bspw. Schraubenschlüssel-Symbol in Bereitschaftsanzeige), wenden Sie sich direkt an den Verantwortlichen Ihres Standortes oder an die Armeeapotheker: aapotas.lba@vtg.admin.ch oder Tel.: **+41 58 467 45 68**.

Anwenderkontrolle: Defibrillator Lifepak 1000

SAP/DVS Nr.: **VFR / 106098** Teildok: **000** Version: **03**

© Armeeapotheker Gültig ab: **01.04.2025** Seite 1 von 1