



MS_Prozesszuordnung LOG - Instandhaltung

MS_Dok-Bezeichnung BE-Betriebsdokument (ohne regelmässige Überprüfung)

Detail zur Dok-Art

CHECKLISTE

Titel

Anwenderkontrolle: Defibrillator Lifepak 1000

Freigabe der Vorlage (Master) im DVS:

Erstellt M. Köhli

Prüfung und Freigabe J. Furer

Die Kontrollen erfolgen gemäss der Gebrauchsanweisung des Defibrillators «Kapitel 5. Pflege des Lifepak 1000 Defibrillators» und müssen regelmässig (gemäss Gebrauchsanweisung wöchentlich) durchgeführt werden.

Standort Defibrillator:		Verantwortliche/r:		Telefonnummer:	
Hersteller Seriennummer:					

Datum der Kontrolle:													
Kontrolle ausgeführt von:													
Visum:													
Kontrollpunkte													
Defibrillator ist sauber, keine Schäden ersichtlich													
2 Elektrodenpakete vorhanden, versiegelt, unbeschädigt, Verfalldatum in Ordnung													
Statusanzeige: Symbole OK angezeigt Batteriekapazität in Ordnung													
Definiertes Zubehör vorhanden Verfalldatum in Ordnung (Handschuhe, Ersatzbatterie, etc...)													
Bemerkungen:													

Tritt am Defibrillator eine Störung auf (bspw. Schraubenschlüssel-Symbol in Bereitschaftsanzeige), wenden Sie sich direkt an den Verantwortlichen Ihres Standortes oder an die Armeepotheke: aapotas.lba@vtg.admin.ch oder Tel.: **+41 58 467 45 68**.

Anwenderkontrolle: Defibrillator Lifepak 1000					
SAP/DVS Nr.:	VFR / 106098	Teildok:	000	Version:	04
© Armeepotheke	Gültig ab:	20.02.2026			Seite 1 von 1