



MS\_Prozesszuordnung LOG - Instandhaltung

MS\_Dok-Bezeichnung BE-Betriebsdokument (ohne regelmässige Überprüfung)

Detail zur Dok-Art

CHECKLISTE

Titel

Contrôle par l'utilisateur : Defibrillator Heartstart FR2

Freigabe der Vorlage (Master) im DVS:

Erstellt M. Köhli

Geprüft J. Furer

Freigabe im DVS J. Furer

Le contrôle doit être effectué au moins une fois par mois, conformément aux dispositions contenues dans le chapitre 4 « Entretien, test et suppression d'erreurs » de la notice d'utilisation du défibrillateur.

Emplacement du défibrillateur :		Responsable :		Numéro de téléphone :	
Numéro de série du fabricant :		Numéro de modèle :			

Date du contrôle d'utilisateur:												
Contrôle effectué par:												
Visa:												
Points à contrôler												
Le défibrillateur est propre, aucun dommage apparent												
2 jeux d'électrodes présents, plombés, pas endommagés,												
Indicateur d'état: Montre alternativement sablier / champ d'identification												
Les accessoires définis sont disponibles, date de péremption o. k. (gants, guide succinct, etc...)												
Remarques												

Si une panne affecte le défibrillateur (p. ex. croix rouge clignotante dans l'indicateur d'état), adressez-vous directement au responsable de votre emplacement ou à la Pharmacie de l'armée : [aapotas.lba@vtg.admin.ch](mailto:aapotas.lba@vtg.admin.ch) ou tel. : +41 58 467 45 68.

Contrôle par l'utilisateur : Defibrillator Heartstart FR2

SAP/DVS Nr.: VFR / 106097 Teildok: 001 Version: 03

© Armeeapotheke Gültig ab: 01.04.2025 Seite 1 von 1