



MS_Prozesszuordnung BP - Entwicklung Medizinprodukte

MS_Dok-Bezeichnung BE-Betriebsdokument (ohne regelmässige Überprüfung)

Detail zur Dok-Art

CHECKLISTE

Titel

Contrôle utilisateur: Defibrillator Mindray BeneHeart C1A

Freigabe der Vorlage (Master) im DVS:

Erstellt V. Palmiter

Geprüft J. Furer

Freigabe im DVS J. Furer

Le contrôle utilisateur du défibrillateur doit être effectué à intervalles réguliers (par exemple, chaque mois).

Emplacement du défibrillateur:	P. ex. salle de soins, couloir 1 ^{er} étage	Responsable:	Nom de la personne responsable du site	Numéro de téléphone:	Personne responsable
Numéro de série du fabricant:	Arrière de l'appareil	Numéro ID AApot:	P. ex. sur le couvercle		

Date du contrôle:									
Contrôle effectué par:									
Visa:									
Points de contrôle									
Le défibrillateur est propre, aucun dommage visible.									
1 jeu d'électrodes est présent dans l'appareil, scellé, la date de péremption est visible de l'extérieur et non dépassée, et les électrodes sont branchées à l'appareil.									
Couvercle fermé: Le témoin d'état clignote en vert et indique que l'appareil est prêt à l'emploi.									
Les accessoires supplémentaires sont disponibles, prêts à l'emploi et la date de péremption n'est pas dépassée: (kit d'urgence, modes d'emploi, électrodes, etc.).									
Bemerkungen:									

Si le témoin d'état du défibrillateur clignote en rouge ou ne s'allume pas, effectuez un autotest manuel ou remplacez la batterie. Si, après l'autotest et avec le couvercle fermé, le témoin d'état ne clignote pas en vert, veuillez contacter le responsable de votre site ou directement la Pharmacie de l'armée:

aapotas.lba@vtg.admin.ch o tel.: **+41 58 467 45 68**.

Contrôle utilisateur: Defibrillator Mindray BeneHeart C1A			
SAP/DVS Nr.: VFR / 115386	Teildok: 001	Version: 00	
© Armeeapotheke	Gültig ab: 31.10.2025	Seite 1 von 1	