



Contrôle par l'utilisateur: Défibrillateur Heartstart FR2



Le contrôle doit être effectué au moins une fois par mois, conformément aux dispositions contenues dans le chapitre 4 « Entretien, test et suppression d'erreurs » de la notice d'utilisation du défibrillateur.

Emplacement du défibrillateur:		Responsable		Numéro de téléphone :	
Numéro de série du fabricant :		Numéro de modèle			

Date du contrôle d'utilisateur :												
Contrôle effectué par :												
Visa :												
Points à contrôler												
Le défibrillateur est propre, aucun dommage apparent												
2 jeux d'électrodes présents, plombés, pas endommagés,												
date de péremption o.k.												
Indicateur d'état :												
montre alternativement												

Si une panne affecte le défibrillateur (p. ex. croix rouge clignotante dans l'indicateur d'état), adressez-vous directement au responsable de votre emplacement ou à la Pharmacie de l'armée (service à la clientèle), n° tél. 058 464 34 21/22; 058 464 20 95

Erstellt: MPR	Prüfung: HOLW	Freigabe: BUJ
© Armeeapotheke / MPT	Version: 01	Ersetzt: Version 00

Titel: Contrôle par l'utilisateur: Défibrillateur Heartstart FR2	Gültig ab: 22.06.2018
MS Nr Schl.: FR-15-04-00-048	SAP/DVS Nr: AFR / 106097
Teildok: 001	Seite 1 von 1